

Valida[®]
Vive el mundo sin barreras



Silla salvaescaleras
UNIKA



Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer la solución salvaescaleras más adecuada a las necesidades de cada usuario, para mejorar su calidad de vida y dotarle de una mayor autonomía en su entorno.

¡Mejora tu calidad de vida!



Silla salvaescaleras UNIKA

UNIKA es la silla monorraíl ideal para escaleras curvas o con rellanos intermedios. Esta silla salvaescaleras es la única máquina del mercado que ofrece el inicio "Smart Start" en primer escalón, evitando de esta forma cualquier tipo de intrusión de la guía en el inicio de las escaleras.

Con un diámetro de guía de tan solo 80 mm., **UNIKA** se convierte en la solución perfecta para aquellas escaleras en las que inicialmente no se podía instalar un salvaescaleras.



SILENCIOSA, CÓMODA Y MUY SEGURA

ADAPTACIÓN PERFECTA A TU ESCALERA



Las imágenes de este catálogo son orientativas y pueden no coincidir con las máquinas reales.



Características generales de la silla salvaescaleras UNIKA

- Permite invasión final: 100 mm. (opcional 0 mm.)
- Posibilidad de inicio vertical (Smart Start).
- Reposapiés, asiento y brazos ajustables.
- Peso máximo: 120 Kg.
- Elección de controles de la silla.
- Giro manual (motorizado: opcional).
- Display digital.
- Guía monorraíl muy estrecha: 80 mm.
- Control de brazos intercambiable.
- Dos controles remotos.
- Cinturón de seguridad retráctil.
- Cumple con la normativa EN81:40.

LA SOLUCIÓN PERFECTA PARA HACERTE LA VIDA MÁS FÁCIL Y SEGURA



Asiento y reposapiés enlazados



Ocupa muy poco espacio



Elección de controles



Display digital



Inclinación 75°



Cinturón de seguridad



Con guía monorraíl

Características opcionales

- SMART START EN PRIMER PELDAÑO: la única solución en el mercado que garantiza el máximo aprovechamiento del espacio, con puertas, pasillos y plantas libres de obstáculos.
- EXTRAPESO 160 Kg: la opción extrapeso está diseñada para cargar más peso que con cualquier otro salvaescaleras monorraíl.
- GIRO MOTORIZADO: la opción de giro motorizado aporta una mayor comodidad al usuario en el desembarque. Disponible en opción extrapeso así como en versión estándar.
- COLOR DE GUÍA PERSONALIZABLE.
- COLOR DE TAPICERÍA A ELEGIR (5 colores).



Color de tapicería a escoger (5 colores diferentes)



DIFERENTES TIPOS DE INICIO PARA ADAPTARSE 100% A TU ESCALERA



SMART START en primer escalón



La silla salvaescaleras **UNIKA** dispone del único sistema en el mercado con inicio "Smart Start". La guía se fija en el primer escalón para evitar la intrusión de la misma en el inicio de las escaleras. De esta forma, se aprovecha al máximo el espacio disponible y la instalación de la silla no supone ningún obstáculo.

Medidas de la silla salvaescaleras UNIKA

Del suelo a parte inferior reposapiés (en tramo horizontal)	20 mm	Del asiento al suelo (Standard Start / Smart Start)	580 mm
De la parte superior del reposapiés a la parte superior del asiento	490-468 mm	En curvas de 180° centro a centro máximo (0°) / frecuente (40°)	420 mm
De la base del asiento al reposabrazos	210 mm	En curvas de 180° centro a centro mínimo (65°)	420 mm
Del reposabrazos a la altura respaldo	150 mm	Radio mínimo de giro desde pared	610 mm
Altura total	980 mm	Radio de curva interna desde eje central	210 mm
Longitud del reposapiés	250 mm	De asiento a suelo (en tramo horizontal)	560 mm
De la punta del reposapiés a la parte trasera del asiento	610 mm	De parte superior reposapiés a suelo (en tramo horizontal)	70 mm
Anchura entre reposabrazos	440-530 mm	De parte superior guía a suelo (en tramo horizontal)	160 mm
Anchura total	570 mm	De parte posterior respaldo a pared	20 mm
Anchura del reposapiés	275 mm	De pared a la parte más externa guía	200 mm
De pared a reposapiés plegado (ocupación silla plegada)	375 mm	De la parte superior del reposapiés al suelo (en inicio normal / dropstart)	70 mm
Ángulo permitido	0-75°	Diámetro de la guía	80 mm
Distancia entre 1r escalón y la guía (con Smart Start)	10 mm		

Las medidas indicadas en este catálogo son orientativas y pueden variar en función de la configuración de cada escalera.

Accesibilidad en 4 sencillos pasos



1

Baja el reposabrazos y el asiento, que están enlazados con el reposapiés. Asegúrate de que el cinturón de seguridad esté bien abrochado.

2

Presiona los botones o usa el joystick, en función del sistema de control elegido, en la dirección deseada.



3

Ponte cómoda/o y disfruta del viaje hasta la planta deseada con total libertad de movimiento y autonomía.


4

Al llegar, utiliza la palanca para girar la silla e incorpórate con total seguridad. Espera a que la silla gire automáticamente (si dispone de giro motorizado).



✓

La silla salvaescaleras viene equipada con dos mandos de control remoto para llevar el salvaescaleras al destino o a la planta deseada.

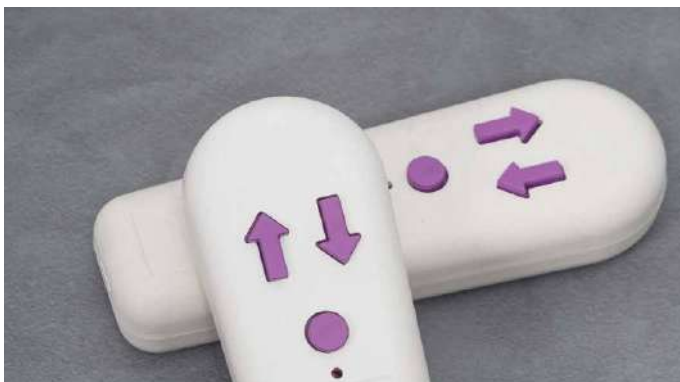

Valida[®]

Vive el mundo sin barreras



900 414 000



info@valida.es



www.valida.es

¡Síguenos!

