


Funcionament de la CADIRA SALVAESCALES

valida[®]


1

Desplega els reposabraços,
el seient i el reposapeus.
Desbloqueja la cadira amb la clau.

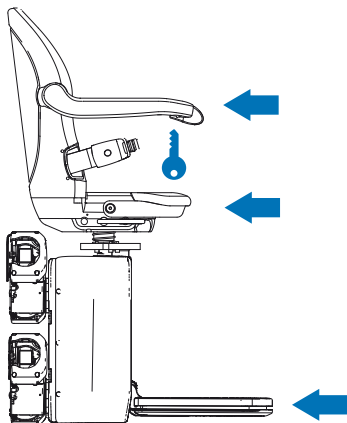


2

Asseu-te còmodament i
corda't el cinturó de
seguretat.

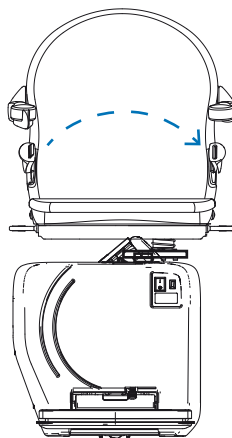


3

Utilitza el comandament
del reposabraços per
moure la cadira cap a
la direcció desitjada.

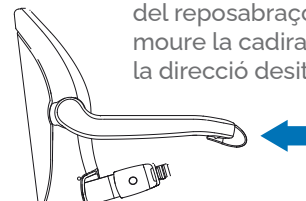

4

Utilitza la palanca
lateral per girar la
cadira i incorpo-
rar-te amb total
seguretat.

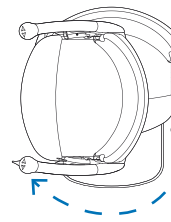

Si disposa de gir
automàtic, la
cadira girarà sola.

Servei d'Assistència Tècnica: 900 414 000

www.valida.cat